

电极帽不工作，我该怎么办？

- 1、 将电极帽放入装有盐水溶液的容器中，并将其连接到脑电图仪器上。注意，所有电极都必须在容器中，接触到溶液，连接器不得接触溶液。
- 2、 测量阻抗。如果有信号（程序显示红色/蓝色/绿色等），说明电极帽之前与脑电图仪器的连接不正确，请确保连接正确后（特别注意检查地线和参考电极的连接），重复对患者进行检测。
- 3、 如果电极帽在溶液中还是没有信号，请联系您的供应商或制造商。