

如何清洁电极帽上的导电胶

建议每次使用完电极帽后，在导电胶没有凝固之前，立即清洁电极和帽子上的导电胶。

- 1、 清洁前，请确保电极帽与脑电图仪器已断开连接；
- 2、 请勿弄湿连接器（插头）！清洁过程中，连接器应尽可能远离任何液体；
- 3、 清洁时，不建议拆卸预安装在帽子上的电极头，也不要拉扯帽子上的电缆；
- 4、 清洁时，请先将电极帽放入 25° 左右温水中浸泡 20-30 分钟，让导电胶溶解后，用清水冲洗，也可以使用温和的洗涤剂（如婴儿洗发水）在水中清洗，使用洗涤剂后，需在干净的自来水中冲洗干净。为了更好的清洁电极上残留的导电胶，请使用产品配套的带有软刷毛的小刷子。
- 5、 洗净的电极帽，先放在毛巾上，让水沥干，然后悬挂于阴凉通风处晾干备用，避免阳光直射；
- 6、 长期不用时，放干燥箱内存放。